

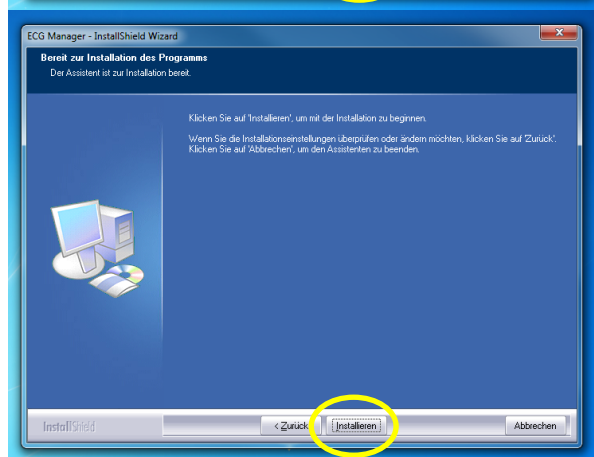
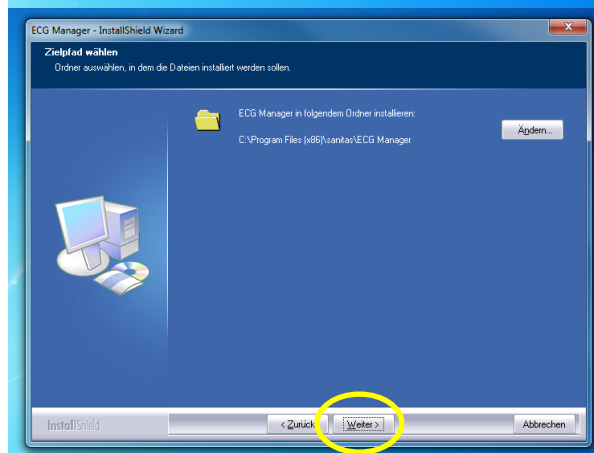


Installation der ECG Manager PC-Software

1. Laden Sie die Installations-Datei im Downloadbereich der Sanitas Homepage herunter:
2. Klicken Sie Setup.exe um die Installation zu starten.
3. Wählen Sie die Sprache und fahren Sie mit der Installation fort.
4. Wählen Sie einen Zielort für die Installation des ECG Manager
5. Klicken Sie [Installieren] um den Installationsvorgang zu starten.

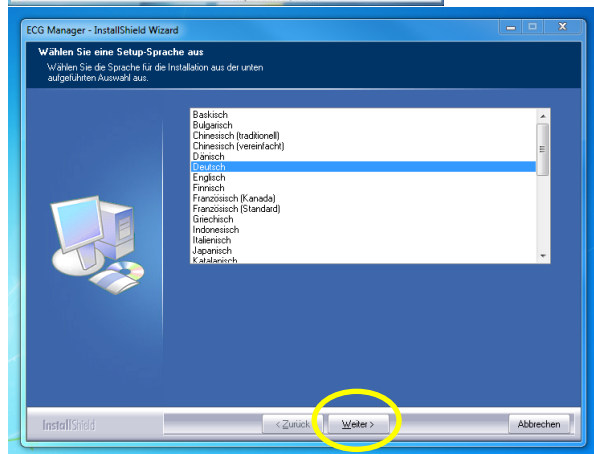

- 6 Klicken Sie[Fertig stellen] um den Vorgang abzuschließen.

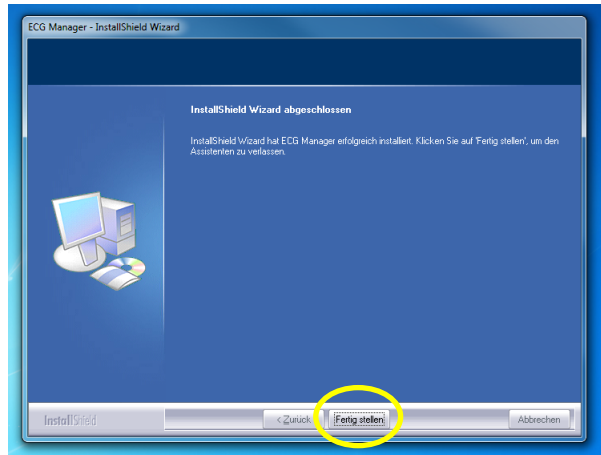

- 7 Das Logo wird auf dem Desktop ihres Computers angezeigt.



Installation of the ECG Manager PC-Software


1 Download the installation file from the Download area of the Sanitas Homepage:




2 Click Setup.exe to start the installation.




3 Select language and continue the process.

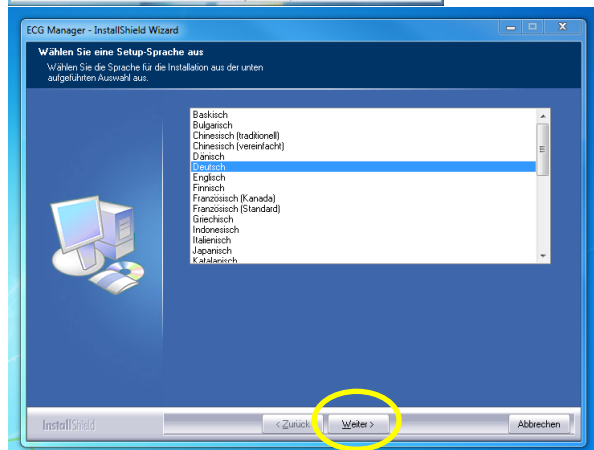


4 Select the folder for installing ECG Manager

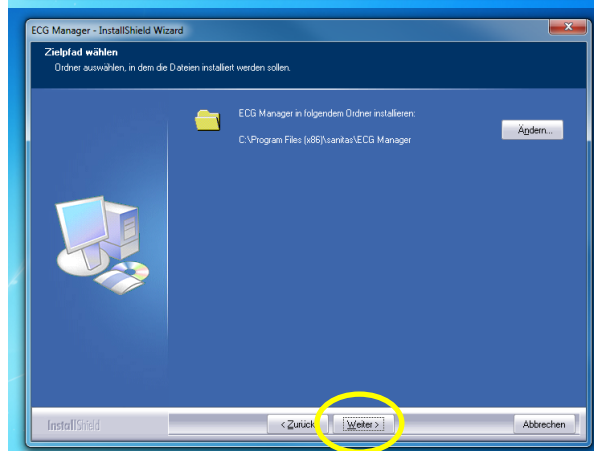

5 Click [install] to start the installation process

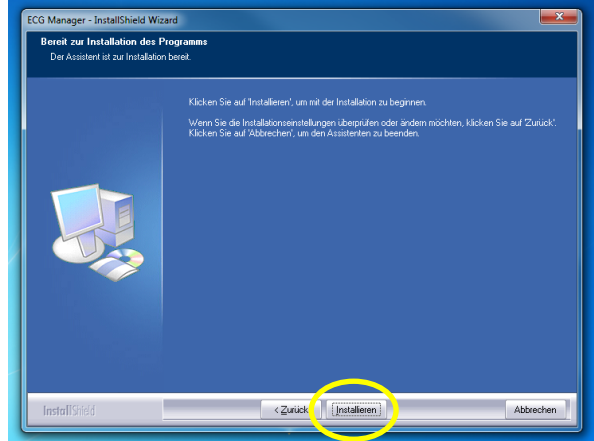

- 6 Click [Finish] to complete the installation process.

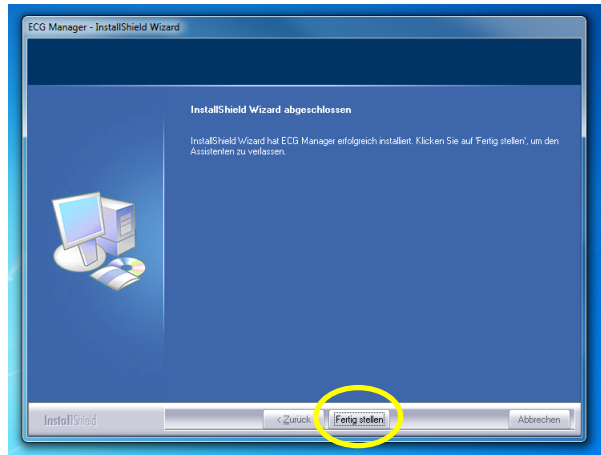

- 7 Then, the icon will be displayed on the desktop.

