

Simbolo del display. Appare il valore di riferimento di 37 °C. Infine appare il simbolo di misurazione “°C” e il display visualizza “Lo”. Il termometro è pronto per la misurazione. Durante la misurazione viene visualizzata la temperatura corrente e il simbolo “°C” lampeggia. La misurazione termina quando si raggiunge una temperatura stabile. Entra in funzione un segnale acustico, il simbolo “°C” cessa di lampeggiare e viene visualizzato la temperatura misurata. Fino a quando la temperatura misurata rimane al di sotto di 32°C, appare il simbolo “Lo°C”. Valori superiori vengono indicati direttamente con un segnale acustico, ad es. 32,1°C. Prolungando la durata della misurazione oltre il segnale acustico, si ottengono risultati più precisi. Durante la misurazione ascoltare si raccomanda di rispettare la durata raccomandata, a prescindere dalla comparsa del segnale acustico. In caso di temperature superiori a 37,8 °C risuona un segnale di allarme (brevi bip per 10 secondi). Se si misurano temperature superiori a 42,9 °C, compare il simbolo “Hi°C”. Per prolungare la durata delle batterie, si raccomanda di spegnere il termometro dopo la misurazione, premendo brevemente il tasto ON/OFF. In caso contrario, il termometro si spegne automaticamente dopo 10 minuti.

MEMORIA

L'ultimo valore misurato viene memorizzato automaticamente e visualizzato subito dopo l'accensione e l'auto-test. Premere il pulsante ON/OFF per visualizzare tale valore. Il termometro procede innanzi tutto a un autotest. Poi l'ultimo valore di misurazione memorizzato compare per circa 2 sec. Infine il display visualizza il valore di riferimento di 37°°C e “Lo”. Il termometro è pronto per la misurazione e il vecchio valore di misurazione memorizzato viene sostituito automaticamente con il nuovo valore di misurazione.

SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE

Il termometro clinico contiene una batteria alcalina al manganese di lunga durata (LR 41, 1,5 V), con un'autonomia di circa 2 anni. Quando viene visualizzato il simbolo della batteria, è necessario sostituire la batteria. Comprimere con le dita il coperchio del vano batteria all'estremità dell'apparecchio e tirarlo con forza all'indietro. Estrarre la batteria esausta e sostituirla con una batteria dello stesso tipo. Il segno + sulla batteria deve essere rivolto verso l'alto. Riappicare quindi il coperchio sul vano batteria.Non gettare le batterie usate nei rifiuti domestici. Siete tenuti per legge a smaltire le vecchie batterie tramite il vostro rivenditore o negli appositi centri di raccolta locali. Avvertenza: sulle batterie contenenti sostanze pericolose sono riportati

ПОЯСНЕНИЯ К СИМВОЛАМ

В инструкции по применению, на упаковке и на типовой табличке прибора и принадлежности используются следующие символы:

	Осторожно!
	Соблюдайте инструкцию по применению
	Аппликатор типа BF
	Утилизация прибора в соответствии с Директивой по отходам электрического и электронного оборудования — WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
	Производитель
IP 27	Защищено от проникновения твердых тел размером ≥ 12,5 мм и от погружения в воду на непродолжительное время
LOT	Номер партии
	Маркировка для идентификации упаковочного материала. A = сокращенное обозначение материала, B = номер материала: 1-7 = пластик, 20-22 = бумага и картон
	Не утилизируйте вместе с бытовым мусором батарейки, содержащие токсичные вещества
	Снимите упаковку с изделия и утилизируйте ее в соответствии с местными предписаниями.
	Допустимая температура и влажность воздуха при хранении и транспортировке
	Допустимая рабочая температура и влажность воздуха
CE	Знак CE